

Link do produktu: <https://www.perfekcyjnydom.pl/wielogilowy-aplikator-do-akupresury-ucisku-masaz-m-6-8-p-2298.html>



Wielogilowy aplikator do akupresury, ucisku - Masaż M 6,8

Cena	295,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PD-APM-M6-8

Opis produktu

Mata oddziałuje na dość dużą powierzchnię ciała, dzięki czemu posiada ona **podwyższoną efektywność terapeutyczną**.

Zabiegi wykonywane przy jej użyciu są zabiegami kompleksowymi charakteryzującymi się bardzo wysoką efektywnością w terapii chorób oraz uszkodzeń **aparatu ruchowego tj.: objawy rwy (kulszowej, barkowej, udowej), wypukliny i przepukliny, dyskopatie, zmiany zwyrodnieniowe, stany pourazowe, mięśniobóle, skrzywienie kręgosłupa i wiele innych**. Leżenie na macie brzuchem można wykorzystywać w profilaktyce i w kompleksowej terapii chorób układu trawienia takich jak: **zaparcia, kolki, dyskieneza dróg żółciowych czy otyłość**. Aplikator wielogilowy Lyapko „Mata” 6,8 dzięki swym ogromnym możliwościom terapeutycznym i rehabilitacyjnym kwalifikuje się w czołówce zainteresowania nią z spośród wszystkich aplikatorów-mat.

Przy tego typu dużym aplikatorze ważnym warunkiem pomyślnego leczenia i braku odczuć dyskomfortu jest poprawne układanie się na nim. Przy poprawnym układaniu względne – niewygodne odczucia pierwszych pięciu minut przechodzą w odczucia **przyjemnego ciepła, wibracji, pulsacji, często kończą się pełnowartościowym zdrowym snem**. W celu poprawnego ułożenia się na aplikatorze, konieczne trzeba najbardziej precyzyjnie ułożyć zgięcia kręgosłupa z pomocą **poprawnie ułożonych poduszek i skręconych wałkami ręczników frotowych**.

Przy dyskomforcie odczuwalnym w przeciągu **10-15 minut**, aplikator należy stosować ponownie tylko po upływie **5-10 godzin** lub dopiero w dniu następnym. Przyczynami odczuć dyskomfortu mogą być: nieprawidłowe ułożenie aplikatora, tzn. nierównomierność obciążenia na igły.

W celu usunięcia odczuć dyskomfortu należy unieść się nad aplikatorem i położyć się na nim ponownie, podkładając wcześniej pod stawy kolanowe miękki wałek.

Czas seansu, czyli czas oddziaływania na skórę aplikatora (leżenia na nim), ma ścisły związek z otrzymaniem pożądanego (wymaganego) efektu:

- w celu tonizowania, znieczulenia przy ostrych bólach, dla podwyższenia wydolności i ciśnienia tętniczego przy hipotonii – ok. 7-10 minut;
- w celu osłabienia, bądź nawet usunięcia długotrwałych chronicznych bólów, obniżenia ciśnienia tętniczego, efektu relaksacyjnego i usypiającego – ok. 15-30 minut i dłużej.

Czas terapii – 1-2 tygodnie. Można ją powtórzyć po upływie 10-14 dni. W praktyce stosując codziennie aplikator w przeciągu kilku miesięcy, można liczyć na trwałą **poprawę samopoczucia, usunięcia chronicznych bólów, obniżenie wagi, podwyższenie życiowego wigoru i wydolności organizmu**.

Rozstaw igieł aplikatorów-mat dobiera się według indywidualnej wrażliwości skóry, która nie zawsze uzależniona jest od wieku. Dla dzieci i osób, z podwyższoną wrażliwością skóry, bądź szczupłej budowy ciała, zaleca się stosować aplikatory płaskie z rozstawem igieł 4,9 – 5,8 mm. Dla osób o małej lub przeciętnej wrażliwości skóry i osób o tęższej budowie zaleca się stosować aplikatory płaskie z rozstawem igieł 6,2 – 7,0 mm.

- wymiary 240×470 mm
- odstęp między igłami 6,8 mm
- ilość igieł 2788
- skład igieł żelazo, miedź, nikiel, cynk, srebro
- podstawa guma medyczna
- okres gwarancji 12 miesięcy

W warunkach domowych — zaleca się mycie aplikatora przy pomocy mydła w płynie i bieżącej wody oraz wysuszenie po umyciu strumieniem gorącego powietrza (suszarką). W placówkach leczniczych do sterylizacji aplikatorów używa się powszechnie stosowanych preparatów medycznych do dezynfekcji powierzchni sprzętu. Przy poprawnym korzystaniu aplikatora jego termin przydatności stanowi **5 - 7 lat**.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.